

Gebrauchsanweisung

Säuglingsbett "Nova"



INHALT

HINWEISE ZUR GEBRAUCHSANWEISUNG	3
VERWENDUNGSZWECK	3
TECHNISCHE DATEN	3
GERÄTESICHERHEIT	3
GERÄTEÜBERSICHT	4
FUNKTIONSWEISE	4
ANLIEFERUNG	5
SICHERHEITSHINWEISE	5
MONTAGE	5
FUNKTIONSPRÜFUNG	5
VERSTELLUNGEN VORNEHMEN	6
<i>Höhenverstellung</i>	6
<i>Anti-Trendelenburg</i>	7
<i>Rollenfeststeller</i>	8
ERSTREINIGUNG	8
DESINFEKTION /STERILISATION	9
ABHILFE BEI STÖRUNGEN	9
LAGERUNG	9
WARTUNG	9
VOLLSTÄNDIGKEIT	10
VERSCHLEISS	10
FUNKTIONALITÄT	10
ROLLEN	10
ENTSORGUNG	10
ERSATZTEILE	10
TYPENSCHILD	10
GARANTIE	11
IHRE ANSPRECHPARTNER BEI DER TOPOL AG	11

Hinweise zur Gebrauchsanweisung

Diese Gebrauchsanweisung wendet sich nicht nur an geschultes Kinderpflegepersonal, sondern auch an Personen, die mit der Pflege und Betreuung des Kindes beauftragt sind.

!Jede Handhabung dieses Produktes setzt eine genaue Kenntnis und Beachtung dieser Gebrauchsanweisung voraus! Daher ist sie sorgfältig bis zur Entsorgung des Säuglingsbettes aufzubewahren! Es empfiehlt sich, sie am Säuglingsbett unterzubringen.

Verwendungszweck

Das Kinderbett kommt in der Regel in Kinderkliniken und im Krankenhaus zum Einsatz. Dieses Bett dient ausschliesslich diesem Zweck. Andere Anwendungen sind mit der Topol AG vorher abzustimmen. Dieses Produkt ist ein Medizinprodukt im Sinne des Medizinproduktegesetzes und unterliegt den Vorschriften der Betriebsverordnung für Medizinprodukte.

Technische Daten

Abmessungen	ca. L = 93 cm B = 49 cm H = 94 - 116 cm
Höhenverstellung	46 – 68 cm (Stufenlos)
Gewicht	ca. 27.5 kg
Trendelenburg	ca. 10°
Säuglingsschale	ca. L = 85 cm B = 38 cm H = 28 cm

Gerätesicherheit

Das Produkt entspricht den Sicherheitsvorschriften nach der Medizinprodukteverordnung (MepV) und trägt das CE-Zeichen gemäss EU-Richtlinien für Medizinprodukte 93/42/EWG, Anhang (VII).

Geräteübersicht



1. Rollen feststellbar
2. Hubsäule (starr / flex)
3. Säuglingsschale
4. Seitenscheiben (starr / flex)
5. Flachtaster Höhenverstellung
6. Flachtaster Anti-Trendelenburg
7. Vorhang beweglich

Funktionsweise

Je nach Ausführung kann das Säuglingsbett durch Verstellen der Säuglingsschale, sowie der Höhenposition in folgende Stellungen gebracht werden:

- Höhe
- Anti-Trendelenburg

Die Verstellungen werden mechanisch durch das Bedienen des jeweiligen Flachtasters vorgenommen.
(siehe Kapitel Verstellungen vornehmen)

Anlieferung

Das Säuglingsbett wird in der Regel komplett montiert angeliefert bzw. vor Ort vom Fachpersonal zusammengebaut. Anhand der Lieferpapiere ist die Vollständigkeit zu überprüfen! Mängel oder Beschädigungen sind sofort bei der Spedition und bei dem Lieferanten anzuzeigen und auf dem Lieferschein zu vermerken. Bitte beachten Sie unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen, die Sie mit der Auftragsbestätigung erhalten haben.

Sicherheitshinweise

Diese Gebrauchsanweisung ist vor dem Gebrauch des Säuglingsbettes zu lesen und stets zu beachten .

- Das Säuglingsbett ist nur auf geraden Böden zu verfahren.
- Beim Verfahren in die verschiedenen Positionen ist darauf zu achten, dass sich keine Personen, Körperteile oder sonstige Gegenstände im Verstellbereich befinden.
- Beim abgestellten Säuglingswagen sind die Rollen zu bremsen.
- Wird der Säuglingswagen unter ein verstellbares Krankenbett gefahren, ist höchste Vorsicht bei den Verstellungen geboten.
- Das Säuglingsbett darf max. mit bis zu 20 kg belastet werden.
- Die Seitenscheiben dürfen max. mit bis zu 10 kg belastet werden.
- Es darf sich weder jemand auf dem Säuglingswagen/Seitenscheiben aufstützen noch eine zusätzliche Last auf dem Säuglingswagen abgelegt werden.
- Es dürfen keine Kinder unter oder mit dem Säuglingsbett spielen.

Montage

Im Bedarfsfall, z.B. zum Zweck des Austausches, können einfache Montagevorgänge auch von fachlich autorisierten Personen durchgeführt werden.

Funktionsprüfung

Vor jedem Einsatz des Säuglingsbettes sind einige Funktionsprüfungen durchzuführen und es ist zu kontrollieren, ob die dem Modell entsprechenden Verstellungen erreicht werden und ohne Unterbrechung erfolgen.

Diese werden im Folgenden näher erläutert.

Verstellungen vornehmen

Höhenverstellung



Flachtaster (5) betätigen und das Säuglingsbett auf die gewünschte Höhe durch loslassen des Flachtasters positionieren.

Anti-Trendelenburg



- Fusstieflage - 10°
Flachtaster (6) betätigen und das Säuglingsbett auf die gewünschte Position durch loslassen des Flachtasters bringen.

Rollenfeststeller



- Gelöst – siehe Bild 1
- Gebremst – siehe Bild 2

Erstreinigung

Vor dem erstmaligen Gebrauch ist das Säuglingsbett mit einem trockenen Tuch zu säubern.

Desinfektion /Sterilisation

Das Säuglingsbett ist regelmässig, mindestens jedoch vor jedem Patientenwechsel zu desinfizieren. Das Säuglingsbett darf nicht in Waschstrassen oder mit Spritzwasser desinfiziert werden. Es wird eine Sprüh- und Wischdesinfektion empfohlen. Für die Desinfektion des Säuglingsbettes werden folgende Mittel empfohlen, die nur durch gleichwertige Mittel ersetzt werden dürfen:

Terralin, Perform Sagrotan Med (Schülke & Mayr AG, Zürich).

Diese Mittel sind nur gemäss Herstellervorschriften zu verwenden! Dies betrifft vor allem die Dosierung der Mittel und eventuelle Gefährdung bei der Kombination mit anderen Mittel.

Abhilfe bei Störungen

Störung	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Verstellungen durch die Mechanik erfolgen nicht	Mechanik wird blockiert	Bewegliche Teile kontrollieren und Fremdkörper entfernen - Tücher oder anderes Material von beweglichen Teilen fern halten
Verstellungen lassen sich nicht mehr arretieren oder durchführen	Mechanik ist defekt, bewegliche Teile sind verbogen und- oder Seilzug ist gerissen	Beschädigte oder defekte Teile durch Fachpersonal austauschen lassen. Das Produkt darf nicht weiter in Betrieb bleiben!

Lagerung

Säuglingsbett so abdecken, dass Beschädigungen oder Lackschäden nicht auftreten können.

Wartung

Das Säuglingsbett sollte regelmässig gewartet werden. Ergibt die Wartung gravierende Mängel, die nicht behoben werden können, ist das Bett für den weiteren Gebrauch zu sperren. Folgende Merkmale sind zu überprüfen und entsprechende Teile jährlich zu warten:

Vollständigkeit

Anhand des Lieferscheins und einer optischen Prüfung ist festzustellen, ob Teile fehlen und daher bestellt oder ersetzt werden müssen.

Verschleiss

Das Säuglingsbett ist in seinen Einzelteilen auf Scheuer-, Kratzer- oder anderweitige Verschleisspuren zu untersuchen, die Ursache ist festzustellen und durch Austausch der Einzelteile zu beheben. Alle Arretierungen und Verstellungen müssen ordnungsgemäss vorgenommen werden können.

Funktionalität

Prüfung, ob alle Verstellungen bis in ihre maximalen Positionen vorzunehmen sind.

Rollen

Prüfung der Funktionalität der Rollen und Entfernen von ggf. angesammeltem Staub, eingefahrene Fäden, Haaren o.ä..

Entsorgung

Das Produkt enthält nur Materialien, die auf dem üblichen Entsorgungsweg für unbedenkliche Abfallprodukte entsorgt werden können.

Ersatzteile

Information durch den Topol-Servicetechniker oder den Verkauf bzw. die technische Beratungstelle, bei der das Säuglingsbett erworben wurde.

Typenschild

Bei Reklamationen oder Nachbestellung von Ersatzteilen sind Angaben auf dem Typenschild erforderlich. Es befindet sich auf dem Abdeckblech unterhalb der Säuglingsschale.

Garantie

Mit diesem Säuglingsbett haben Sie ein Topol-Qualitätsprodukt erworben. Dieses Bett wurde mit Sorgfalt unter Verwendung hochwertiger Materialien und moderner Produktionstechniken hergestellt.

Auf das Säuglingsbett besteht 24 Monate Garantie,

gerechnet ab Kaufdatum. Diese Garantie umfasst alle durch Material und Fabrikation bedingten Störungen und Fehler und Verschleissteile bzw. Verbrauchsmaterialien. Ausgeschlossen sind Störungen und Fehler, die durch unsachgemässe Handhabung und äusseren Einwirkungen entstehen. Sollte es dennoch innerhalb der Garantiezeit Anlass zu berechtigten Beanstandung geben, werden diese kostenlos behoben. Mit dem Kaufbeleg, der das Kaufdatum trägt, kann diese Garaniteleistung geltend gemacht werden. Es gelten unsere Geschäfts- und Lieferbedingungen.

Ihre Ansprechpartner bei Topol AG

Gerne sind wir Ihnen unter folgenden Service-Adressen behilflich:

Technischer Kundendienst / 24h Service vor Ort:

Tel.: 0800 002 330
E-Mail: service@topol.ch

Ersatzteile / Technische Kundenberatung:

Tel.: +41 62 923 04 43
E-Mail: info@topol.ch

Anschrift / Homepage:

Topol AG
Sanitär- Medizintechnik
Engermatte 14
CH-4936 Kleindietwil
Tel. +41 62 923 04 43
Fax. +41 62 923 04 41
info@topol.ch
www.topol.ch